


Lignina arkusze

Karta produktu

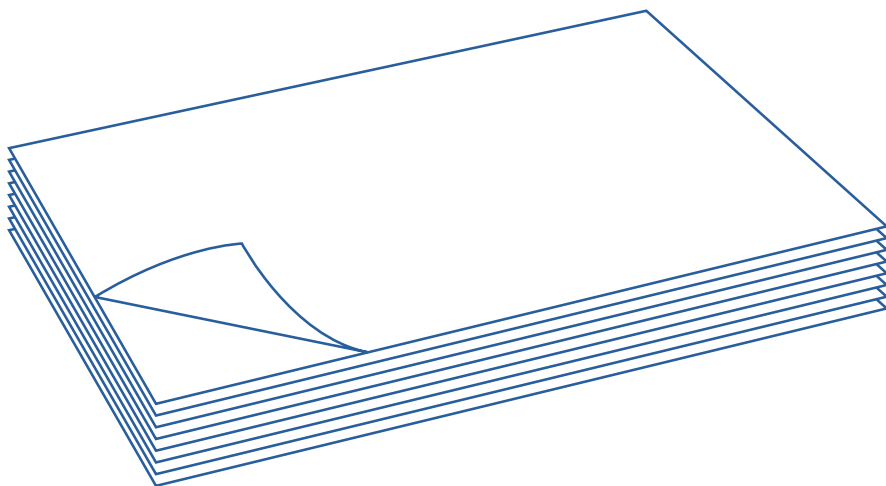

Zgodność z europejskim Rozporządzeniem 2017/745 - Klasa I niesterylna.

Przewidziane zastosowanie

Wyrób przeznaczony jest do ochrony pacjenta przed zakażeniami oraz zanieczyszczeniami powstałymi podczas wykonywania zabiegów lub świadczeń medycznych, stomatologicznych, rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, itp. Może być również stosowany w celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych prowadzonych zabiegów poprzez poprawę i utrzymanie prawidłowego stanu czystości pola zabiegowego. Wyrób przeznaczony jest do stosowania w ochronie: pacjenta, mebli, sprzętów i aparatury medycznej przed zanieczyszczeniami, a także przed zakażeniami powodującymi choroby, powstałymi w trakcie udzielanych świadczeń lub wykonywanych zabiegów medycznych. Ze względu na swoją higroskopijność wyrób może być również stosowany do usuwania zanieczyszczeń płynnych z powierzchni przedmiotów. Wyrób może być stosowany: w szpitalach, w przychodniach, w placówkach medycznych (w tym w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, rehabilitacyjnych) i fizjoterapeutycznych podczas udzielania świadczeń medycznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych.

Sposób użycia

Przed zastosowaniem należy odpowiednio dobrać rozmiar arkusza do wielkości zabezpieczanej powierzchni. Należy wziąć odpowiednio większą ilość arkuszy, aby wystarczała na całkowite zakrycie chronionej powierzchni. Należy wyjąć arkusz z opakowania i rozłożyć na suchej, czystej powierzchni. Należy upewnić się czy chroniona powierzchnia jest całkowicie zakryta, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się materiału zakaźnego. Po zastosowaniu zużyty arkusz należy podnieść za wszystkie krawędzie i wyrzucić do worka lub pojemnika przeznaczonego na odpady medyczne.

Lignina arkusze

Karta produktu

Skład

Celuloza

Opakowanie

Zewnętrzne: worek foliowy

Okres ważności

Jest umieszczony na opakowaniu i stanowi 3 lata.

Rozmiary i waga

Dla danego produktu.

15 × 20 cm

500 g

15 × 20 cm

1 kg

15 × 20 cm

5 kg

20 × 30 cm

500 g

20 × 30 cm

1 kg

20 × 30 cm

5 kg

40 × 60 cm

1 kg

40 × 60 cm

5 kg

Ilość na palecie

Dla danego produktu.

15 × 20 cm

480 opakowań

15 × 20 cm

240 opakowań

15 × 20 cm

64 opakowań

20 × 30 cm

480 opakowań

20 × 30 cm

240 opakowań

20 × 30 cm

64 opakowań

40 × 60 cm

240 opakowań

40 × 60 cm

64 opakowań

Lignina arkusze

Karta produktu

Kod produktu

Dla danego produktu.

15 × 20 cm	500 g	SC-LA-00005
------------	-------	-------------

15 × 20 cm	1 kg	SC-LA-00007
------------	------	-------------

15 × 20 cm	5 kg	SC-LA-00006
------------	------	-------------

20 × 30 cm	500 g	SC-LA-00003
------------	-------	-------------

20 × 30 cm	1 kg	SC-LA-00002
------------	------	-------------

20 × 30 cm	5 kg	SC-LA-00004
------------	------	-------------

40 × 60 cm	1 kg	SC-LA-00008
------------	------	-------------

40 × 60 cm	5 kg	SC-LA-00001
------------	------	-------------

Przechowywanie i gospodarka odpadami

Wyrób transportować i przechowywać w oryginalnym opakowaniu, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, zamoczeniem oraz wpływem czynników atmosferycznych. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Zastosowane oznakowanie



Lignina arkusze

Karta produktu

Producent

Steriwund sp. z o.o.
Mleczna 73, 43-400 Cieszyn
Polska
www.steriwund.pl

Dystrybutor Czechy

Steriwund s.r.o.
Lidická 43/886, 736 01 Havířov
Česká republika
www.steriwund.cz