

**NATURAN**  
POLSKA®

**OFERTA  
MEDYCZNA**



# VirKon®



**PREPARAT DO OGÓLNEJ  
DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI  
ORAZ DO DEZYNFEKCJI I MYCIA  
NARZĘDZI LEKARSKICH**

**VIRKON - dezynfekcja ogólna powierzchni, dezynfekcja i mycie narzędzi lekarskich**



# VirKon®

## SKŁAD

VIRKON jest preparatem wieloskładnikowym, zawiera związki powierzchniowo czynne, substancje utleniające, kwasy organiczne, nieorganiczne układy buforujące, stabilizatory i barwnik. Jedną z substancji czynnych jest mononadsiarzan potasu.

## ZAKRES STOSOWANIA

VIRKON stosowany jest w stężeniu 2% w czasie działania 10 minut do ogólnej dezynfekcji powierzchni oraz do dezynfekcji i mycia narzędzi lekarskich. Działa bakteriobójczo i wirusobójczo (włącznie z HIV i HBV). Stosowany do dezynfekcji ogólnej czystych powierzchni działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo w czasie 15 minut. Może być stosowany do rozlanych płynów ustrojowych i wydaliny. VIRKON zgodnie z podanym sposobem może być stosowany do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wykonanych z gumy, szkła, tworzyw sztucznych i metalu.

## WŁAŚCIWOŚCI

VIRKON jest jasnoróżowym proszkiem łatwo rozpuszczalnym w wodzie. W stężeniu użytkowym roztwór ma ciemnoróżową barwę, charakteryzuje się właściwościami myjącymi, a także przyjemnym zapachem. Roztwory użytkowe preparatu posiadają kwaśny odczyn, dlatego nie należy ich mieszać z detergentami i innymi związkami chemicznymi o odczynie zasadowym. VIRKON prawidłowo stosowany nie powoduje schorzeń o podłożu alergicznym (astmy, stanów zapalnych skóry), nie ma właściwości mutagennych i rakotwórczych.

## PRZYGOTOWANIE ROZTWORU ROBOCZEGO

- Odmierzoną ilość preparatu wsypać do naczynia lub opryskiwacza napełnionego odpowiednią ilością wody i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia proszku. Zaleca się stosowanie letniej wody (temperatura około 30°C). Przygotowany, nieużywany roztwór VIRKONU może być przechowywany 1 dzień. Zmniejszenie intensywności ciemnoróżowej barwy roztworu świadczy o utracie skuteczności.
- Przy sporządzaniu roztworu należy stosować rękawice ochronne i ochronę oczu/twarzy. W czasie wykonywania dezynfekcji zaleca się używanie rękawic ochronnych.
- Przy postępowaniu z proszkiem stosować środki ostrożności podane na etykiecie.

## SPOSÓB UŻYCIA

Przy używaniu roztworu VIRKONU do dezynfekcji przez zanurzenie należy zwrócić uwagę na ilość dezynfekowanego sprzętu i jego zanieczyszczenie materiałem biologicznym. Roztwór należy wymienić, jeżeli ulegnie zmianie intensywność barwy, wystąpi zmętnienie lub osad.

### Dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie pomieszczeń i sprzętów należy obficie zwilżyć 2% roztworem VIRKONU przy pomocy czystej ścierki, mopa lub opryskiwacza (powierzchnie oczyszczone). Po 10-15 minutach powierzchnie należy przemyć wodą stosując czyste, zdezynfekowane (termicznie) ścierki lub mopy.

### Dezynfekcja i mycie narzędzi i sprzętu medycznego

Zanieczyszczone przedmioty należy:

- zanurzyć na 10 minut w 2% roztworze VIRKONU
- umyć w tym samym roztworze
- wypłukać w ciepłej wodzie i osuszyć.

Przed użyciem, w zależności od przeznaczenia, narzędzia i sprzęt należy wysterylizować lub ponownie zdezynfekować.

### UWAGA! Należy ściśle przestrzegać czasu dezynfekcji.

### Dezynfekcja rozlanych płynów ustrojowych i wydaliny

Założyć rękawice ochronne. Rozlane płyny posypać równomiernie VIRKONEM w postaci proszku, pozostać na czas nie krótszy niż 10 minut. Całość zebrać jednorazowym, higroskopijnym materiałem (np. serwetą, płat ligniny, ręcznik jednorazowego użytku), umieścić w pojemniku z materiałem zakaźnym. Następnie powierzchnię zmyć 2% roztworem VIRKONU. Po wykonaniu dezynfekcji zdjąć rękawice, umieścić w pojemniku na odpady zakaźne. Zachować ostrożność: w czasie posypywania nie należy powodować rozpylania proszku! Chronić skórę, oczy i drogi oddechowe.

W związku z minimalną toksycznością roztworu w stężeniu użytkowym i wysoką skutecznością, VIRKON został dopuszczony przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie do dezynfekcji i mycia sprzętów oraz narzędzi chirurgicznych w oddziałach położniczych, a także powierzchni i sprzętów, w tym również inkubatorów w oddziałach noworodkowych i wcześniaków.

### Opinia PZH:

nr HB/69/90, HB/251/91/92, HB/533/00

### Wpis do Rejestru wyrobów medycznych:

nr PL/CA01 00755

Pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym: nr 0144/03

Karta charakterystyki na: [www.naturan.pl](http://www.naturan.pl)

## DYSTRYBUTOR:

NATURAN POLSKA Sp. z o.o. Sp. komandytowa  
ul. Krynoliny 1, 03-644 Warszawa  
tel. +48 22 633 95 59, fax +48 22 633 93 36  
e-mail: [info@naturan.com.pl](mailto:info@naturan.com.pl)

[www.naturan.pl](http://www.naturan.pl) • [www.naturan.com.pl](http://www.naturan.com.pl)

**NATURAN**  
POLSKA®