

## ULOTKA INFORMACYJNA PRODUKTU

### ARGOTIAB™ SPRAY 125 ml

Wyrób medyczny wspomagający ochronę ran i otarć na skórze. Do użytku zewnętrznego.

**Wskazania do stosowania:** wyrób medyczny **ARGOTIAB™ SPRAY** to proszek, który dzięki swoim właściwościom pełni funkcję bariery ochronnej, zapobiegając maceracji ran, w szczególności w przypadku ran sączących oraz pomagając w przywróceniu prawidłowych warunków fizjologicznych potrzebnych do spontanicznej regeneracji skóry. Dzięki składnikom produktu, na skórze nie powstają infekcje, które często pojawiają się w obecności ran z wysiękiem, w przebiegu stopy cukrzycowej, stopy atlety oraz w przypadku odleżyn i niewielkich ran ciętych. Działanie ochronne wynika z połączenia kaolinu z kwasem hialuronowym o właściwościach hydrofilowych. Każdy z tych składników ma określone działanie: kaolin, nazywany białą gliną, działa jak materiał wchłaniający w przypadku ran sączących, kwas hialuronowy działa nawilżająco. TIAB – kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z nanocząsteczkami aktywnego srebra, wchodzi w skład bariery utworzonej przez kaolin i kwas hialuronowy, zapewnia odporność tej bariery na ataki ze strony drobnoustrojów, wspomaga w ten sposób ochronę rany. **ARGOTIAB™ SPRAY** jest proszkiem do stosowania miejscowego tworzącym skuteczną barierę ochronną i wspomagającym naturalne procesy odnowy tkanki poprzez podwójne działanie:


- izoluje miejsce zastosowania proszku, tworzy mikrośrodowisko rany sprzyjające jej szybkiemu i spontanicznemu gojeniu;
- chroni przed infekcjami, zabezpiecza przed tworzeniem się flory bakteryjnej w miejscu zastosowania, tworząc w ten sposób lepsze warunki do regeneracji tkanek skóry.

**Sposób użycia:** 1) Przed nałożeniem umyć skórę i dokładnie ją osuszyć. 2) Zaaplikować cienką warstwę proszku na chore miejsce. 3) Nie masować. 4) Powtarzać czynność dwa razy dziennie. **Przeciwwskazania:** Nadwrażliwość na składniki wyrobu. Nie stwierdzono działań niepożądanych w przypadku przedawkowania. Nie są znane interakcje z lekami i substancjami medycznymi. **Skład:** TIAB (kompleks dwutlenku tytanu połączonego kowalencyjnie z nanocząsteczkami aktywnego srebra), kaolin, hialuronian sodu, krzemionka, gaz: N-butan. **Termin ważności:** termin ważności odnosi się do wyrobu przechowywanego w oryginalnym opakowaniu.

e1753

Wyrób medyczny

CE 0426

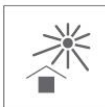

**Wytwórca:** NMTECH ITALIA srl  
Via Vittor Veneto 7, 00187 Rzym, Włochy

**Dystrybutor:** HEXANOVA Sp. z o.o.,  
Pierków 11, 05-152 Czosnów