

Detro[®] Forte

Gotowy do użycia preparat na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz pozostałych termolabilnych wyrobów medycznych

- aktywność sporobójcza – 15 minut
- dezynfekcja – 5 minut
- przebadany wg normy EN 17126
- gotowy do użycia
- szeroka kompatybilność materiałowa
- do użycia manualnego i w myjniach
- kontrola aktywności za pomocą pasków testowych



WYRÓB MEDYCZNY KLASY IIB

GOTOWY DO UŻYCIA

OPAKOWANIE:

TYP OPAKOWANIA	OPAKOWANIE ZBIORCZE	KOD KRESKOWY
5L	4 x KANISTER 25 x paski testowe	8680097100016



detrox[®]
Integrated Disinfection Solutions

POLMIL

Detro® Forte

Gotowy do użycia preparat na bazie aldehydu glutarowego do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz pozostałych termolabilnych wyrobów medycznych

OBSZARY ZASTOSOWANIA:

Detro® Forte jest przeznaczony do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz oprzyrządowania endoskopowego, a także pozostałych narzędzi i wyrobów medycznych, które nie mogą być poddane sterylizacji w wysokiej temperaturze. Preparat wykazuje szeroką kompatybilność materiałową z narzędziami chirurgii małoinwazyjnej, szkłem, tworzywem sztucznym oraz elementami optycznymi. Detro® Forte może być stosowany do dezynfekcji wszystkich rodzajów endoskopów giętkich oraz ich osprzętu dodatkowego.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- Produkt gotowy do użycia
- Środek do dezynfekcji wysokiego stopnia
- Odpowiedni do dezynfekcji manualnej oraz do stosowania w myjniach-dezynfektorach do endoskopów
- Zapobiega korozji narzędzi dzięki zawartości inhibitorów korozji
- Kompatybilny z wszystkimi markami endoskopów
- Aprobata producenta endoskopów, firmy KARL STORZ

SKŁAD:

2% aldehyd glutarowy, związki antykorozyjne, substancje pomocnicze.

SKUTECZNOŚĆ MIKROBIOLOGICZNA:

DZIAŁANIE	NORMA	CZAS
Bakterie	EN 13727 EN 14561	5 minut
Grzyby	EN 13624 EN 14562	5 minut
Prątki	EN 14348 EN 14563	5 minut
Wirusy (Polio, Adeno, Noro)	EN 14476	5 minut
Spory (B. subtilis)	EN 13704	15 minut
Spory (B. cereus, Cl. difficile)	EN 17126	15 minut

SPOSÓB UŻYCIA:

- Dodać do kanistra Detro® Forte zawartość opakowania dołączonej substancji buforującej (rys.), zamknąć kanister i wstrząsnąć.
- Pozostawić na 15 minut.
- Wlać do czystego i zamykanego pojemnika
- Przemyte i wypłukane narzędzia zanurzyć całkowicie w roztworze tak, aby nie wystawały żadne elementy.
- Zamknąć pojemnik. Odczekać do upływu czasu kontaktu.
- Wypłukać narzędzia w sterylnej lub destylowanej wodzie.
- Stosować przez okres min. 28 dni. Aktywność należy sprawdzać codziennie przy pomocy pasków testowych.
- Preparat należy wymienić jeśli paski nie zabarwią się na kolory wskazane na tubie.



OKRES WAŻNOŚCI:

Termin ważności preparatu wynosi 36 miesięcy od daty produkcji.



WYTWÓRCA:

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mh. Cemal Gürsel cd. No:8/3 Esenyurt,
Istanbul/Turkey
www.detrox.com.tr

POLMIL

IMPORTER:

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8b
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl
handlowy@polmil.pl